

ANTIEPILEPTIKA Analyseusikkerhed (impræcision) oplyses ved henvendelse til laboratoriet

Medikament Indholdsstof Analysemetode	Akkrediteret ISO 15189	Handelsnavne	Prøvemateriale og mængde** afpipetteret	Glastype	Opbevaring	Forsendelse LINK: Forsendelse/ holdbarhed	Særlige forhold	Udføres***	Vejledende terapeutisk interval
Brivaracetam NPU57004 UPLC/MSMS		Briviact®	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	4-5/uge	1,5–10,0 µmol/l
Bromid NPU29315 Udføres på tysk laboratorium		Dibro-be® Ikke registreret	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	Efter behov	4–28 mmol/l
Carbamazepin NPU1457 Immunkemi		Karbamazepin "DAK", Tegretol®, Timonil®, Tegratal Retard	Serum eller heparin plasma 500 µl ** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	2/uge	20-50 µmol/l
Clobazam NPU3932 UPLC/MSMS		Frisium®	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 550 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	100-1000 nmol/l
Clobazam, gruppe NPU57550 Tre delsvar: Cloba, meta- bolit og ratio UPLC/MSMS		Frisium®	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 550 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	Se under Clobazam Ratio: N-Desmethyloclo- bam/Clobazam. "Normale patienter": R <10.
Clonazepam NPU01618 UPLC/MSMS		Rivotril®	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl) Afpipetteres inden for 6 timer.	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	40-110 nmol/l

ANTIEPILEPTIKA Analyseusikkerhed (impræcision) oplyses ved henvendelse til laboratoriet

Medikament Indholdsstof Analysemetode	Akkrediteret ISO 15189	Handelsnavne	Prøvemateriale og mængde** afpipetteret	Glastype	Opbevaring	Forsendelse LINK: Forsendelse/ holdbarhed	Særlige forhold	Udføres***	Vejledende terapeutisk interval
Diazepam NPU18686 UPLC/MSMS		Apozepam®, Diazepam "DAK", Hexalid®, Stesolid®.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	>900 nmol/l
Eslicarbazepin NPU29859 UPCL/MSMS	Bestemmes som Oxcarba- zepin	Zebiniz®	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	4-5/uge	30-105 µmol/l, "oxcarbazepin", jf denne.
Ethosuximid NPU01999 Immunkemi		Zarondan®	Serum eller heparin plasma 500 µl** (min. 250 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	2/uge	240-700 µmol/l
Felbamaf NPU10148 UPLC/MSMS		Taloxa® Ikke registreret.	Serum eller heparin plasma 1 ml µl** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	30-130 µmol/l (børn)
Fosphenytoin Rekvirering: Phenytoin		Pro-Epanutin	Serum eller heparin plasma 500 µl** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	4-5/uge	30-90 µmol/l
Gabapentin NPU10155 UPLC/MSMS		Gabapentin, Gabaratio, Neurontin.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	10-90 µmol/l
Lacosamid NPU28331 UPLC/MSMS		Vimpat®	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	10-40 µmol/l,

ANTIEPILEPTIKA Analyseusikkerhed (impræcision) oplyses ved henvendelse til laboratoriet

Medikament Indholdsstof Analysemetode	Akkrediteret ISO 15189	Handelsnavne	Prøvemateriale og mængde** afpipetteret	Glastype	Opbevaring	Forsendelse LINK: Forsendelse/ holdbarhed	Særlige forhold	Udføres***	Vejledende terapeutisk interval
Lamotrigin NPU08732 UPLC/MSMS		Lamictal®, Lamotrigin.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	4-5/uge	10-50 µmol/l
Levetiracetam NPU18848 UPLC/MSMS		Keppra®, Levetiracetam	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	4-5/uge	20-140 µmol/l
Midazolam NPU04250 UPLC/MSMS		Buccolam, Midazolam	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	15-245 nmol/l
Nitrazepam NPU02915 UPLC/MSMS		Nitrazepam "DAK", Pacisyn®.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	150-600 nmol/l
"Oxcarbazepin" Rekvirering: NPU03902 UPLC/MSMS		Apydan®, Trileptal®, Oxcarbazepin.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	4-5/uge	30-130 µmol/l MHD metabolit
Perampanel NPU29286 UPLC/MSMS		Fycompa®	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	300-2800 nmol/l Ved komedicinerings med induktorer ses reduktion op til 75 %
Phenobarbital NPU03062 Immunkemi		Fenemal "SAD", Fenemal "DLF".	Serum eller heparin plasma 1 ml µ**l (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	2/uge	40-170 µmol/l
Phenytoin, Frit NPU08971 HPLC/UV		Fenytoin "DAK", Pro-Epanutin.	Serum eller heparin plasma 2,5 ml** (min. 1,5 ml)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	1 gang/uge	3-9 µmol/l eller 10 - 20 % af total

ANTIEPILEPTIKA Analyseusikkerhed (impræcision) oplyses ved henvendelse til laboratoriet

Medikament Indholdsstof Analysemetode	Akkrediteret ISO 15189	Handelsnavne	Prøvemateriale og mængde** afpipet- teret	Glastype	Opbevaring	Forsendelse LINK: Forsendelse/ holdbarhed	Særlige forhold	Udføres***	Vejledende terapeutisk interval
Phenytoin, Total NPU03085 Immunkemi		Fenytoin "DAK", Pro-Epanutin.	Serum eller heparin plasma 500 µl** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	2/uge	30-90 µmol/l
Pregabalin NPU26738 UPLC/MSMS		Lyrica®, Brieka, Pregabalin.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	10-35 µmol/l
Primidon Rekvirering: NPU03235 Im- munkemi		Primidon "Era".	Serum eller heparin plasma 500 µl** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	2/uge	20-60 µmol/l (Primidon)
Rufinamid NPU27465 UPLC/MSMS		Inovelon®	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	15-90 µmol/l (foreløbigt interval)
Stiripentol NPU29287 UPLC/MSMS		Diacomit®	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	15-95 µmol/l
Sultiam NPU10196 Udføres på tysk laboratorium		Ospolot® Ikke registreret	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	Efter behov	5,0-35,0 µmol/l
Topiramet NPU09119 UPLC/MSMS		Topimax®, Topiratore, Topiramet.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	4-5/uge	6-30 µmol/l

ANTIEPILEPTIKA Analyseusikkerhed (impræcision) oplyses ved henvendelse til laboratoriet

Medikament Indholdsstof Analysemetode	Akkrediteret ISO 15189	Handelsnavne	Prøvemateriale og mængde** afpipetteret	Glastype	Opbevaring	Forsendelse LINK: Forsendelse/ holdbarhed	Særlige forhold	Udføres***	Vejledende terapeutisk interval
Valproat NPU0373 Immunkemi		Delepsine®, Deprakine®, Orfiril®, Depakine.	Serum eller heparin plasma 500 µl** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	2/uge	200-650 µmol/l
Zonisamid NPU27126 UPLC/MSMS		Zonegran®	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	30-120 µmol/l

ANTIDEPRESSIVA Analyseusikkerhed (impræcision) oplyses ved henvendelse til laboratoriet

Medikament Indholdsstof	Akkrediteret ISO 15189	Handelsnavne	Prøvemateriale og mængde** afpipetteret	Glastype	Opbevaring	Forsendelse LINK: Forsendelse/ holdbarhed	Særlige forhold	Udføres***	Vejledende terapeutisk interval
Amitriptylin Rekvirering: NPU18014 Total og delsvar opgives UPLC/MSMS		Amitriptylin "DAK", Saroten®.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	4-5/uge	360-900 nmol/l incl. metabolit)
Citalopram NPU04778 UPLC/MSMS		Cipramil®, Citalopram.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	4-5/uge	100-400 nmol/l
Clomipramin Rekvirering: NPU18013 Total og delsvar opgives UPLC/MSMS		Anafranil®, Klomipramin, Clomipra- min-hydroch- lorid.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	4-5/uge	250-1000 nmol/l (incl. metabolit)
Doxepin Rekvirering: NPU18011 Total og delsvar opgives UPLC/MSMS		Sinquan®.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	4-5/uge	180-550 nmol/l (incl. metabolit)
Duloxetine NPU26896 UPLC/MSMS		Cymbalta®, Aritavi®, Duloxetine, Yentreve®, Loxentia®	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	35-335 nmol/l
Escitalopram NPU20190 UPLC/MSMS	Se Citalopram	Cipralax®, Escivriens, Escitalopram.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	4-5/uge	50-200 nmol/l Bestemmes som Citalopram

ANTIDEPRESSIVA Analyseusikkerhed (impræcision) oplyses ved henvendelse til laboratoriet

Medikament Indholdsstof	Akkrediteret ISO 15189	Handelsnavne	Prøvemateriale og mængde** afpipetteret	Glastype	Opbevaring	Forsendelse LINK: Forsendelse/ holdbarhed	Særlige forhold	Udføres***	Vejledende terapeutisk interval
Fluvoxamin NPU04117 UPLC/MSMS		Dumirox.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	155-785 nmol/l
Fluoxetin Rekvirering: NPU18015 Total og delsvar opgives UPLC/MSMS		Fontex®, Fluoxetin Fluoxetine Oxexin	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	4-5/uge	200-1200 nmol/l (incl. metabolit)
Imipramin Rekvirering: NPU17970 Total og delsvar opgives UPLC/MSMS		Imipramin "DAK".	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	4-5/uge	535-1100 nmol/l (incl. metabolit)
Mianserin, gruppe Rekvirering: NPU 57549 To delsvar: Mi- anserin+ metabolit UPLC/MSMS		Mianserin, "Oripham", Mianserin- hydrochlorid, "2Care4"	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	Efter behov	55-265 nmol/l
Mirtazapin NPU14028 UPLC/MSMS (Udføres pt på AUH)		Mirtin®, Remeron® Smelt, Combar.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	50-350 nmol/l

ANTIDEPRESSIVA Analyseusikkerhed (impræcision) oplyses ved henvendelse til laboratoriet

Medikament Indholdsstof	Akkrediteret ISO 15189	Handelsnavne	Prøvemateriale og mængde** afpipetteret	Glastype	Opbevaring	Forsendelse LINK: Forsendelse/ holdbarhed	Særlige forhold	Udføres***	Vejledende terapeutisk interval
Nortriptylin NPU02923 UPLC/MSMS		Noritren®.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	4-5/uge	190-570 nmol/l (som selvstændigt lægemiddel)
Paroxetin NPU04863 UPLC/MSMS		Seroxat®, Paroxetin.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	4-5/uge	90-365 nmol/l
Sertralin NPU09364 UPLC/MSMS		Zoloft®, Sertrone.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	25 - 150 nmol/l
Venlafaxin Rekvirering: NPU19609 Total og delsvar opgives UPLC/MSMS		Efexor®, Depot, Venlafaxin, Duofaxin.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	4-5/uge	300 - 2700 nmol/l (incl. metabolit)

ANTIPSYKOTIKA Analyseusikkerhed (impræcision) oplyses ved henvendelse til laboratoriet

Medikament Indholdsstof	Akkrediteret ISO 15189	Handelsnavne	Prøvemateriale og mængde** afpipetteret	Glastype	Opbevaring	Forsendelse LINK: Forsendelse/ holdbarhed	Særlige forhold	Udføres***	Vejledende terapeutisk interval
Amisulprid NPU28910 UPLC/MSMS		Solian®, Amisulprid DLF.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	270-870 nmol/l
Aripiprazol Rekvirering: NPU29379 Total og delsvær opgives UPLC/MSMS		Abilify®, Aripiprazol, Aripoprazole, Lemilvo.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	300-1700 nmol/l (Incl. metabolit)
Clozapin NPU04114 UPLC/MSMS		Leponex®, Clozapin.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	4-5/uge	300-2000 nmol/l
Fluphenazin NPU04790 UPLC/MSMS		Sigalone®. Ikke registreret.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	0,5-6,4 nmol/l
Flupentixol NPU4797 UPLC/MSMS		Fluanxol®.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	2-8 nmol/l
Haloperidol NPU03937 UPLC/MSMS		Serenase®, Haloperidol-de- kanoat.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	13,0-40,0 nmol/l
Olanzapin NPU09358 UPLC/MSMS		Zyprexa®, Zypadhera®, Zalasta®, Olanzapin, Olanzapine.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	25-150 nmol/l

ANTIPSYKOTIKA Analyseusikkerhed (impræcision) oplyses ved henvendelse til laboratoriet

Medikament Indholdsstof	Akkrediteret ISO 15189	Handelsnavne	Prøvemateriale og mængde** afpipetteret	Glastype	Opbevaring	Forsendelse LINK: Forsendelse/ holdbarhed	Særlige forhold	Udføres***	Vejledende terapeutisk interval
Paliperidon NPU18359 UPLC/MSMS		Invega®, Xeplion.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	15-125 nmol/l (Som selvstændigt lægemiddel)
Perphenazin NPU03047 UPLC/MSMS		Trilafon®, Dekanoat.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	2,0-6,0 nmol/l
Quetiapin NPU18999 UPLC/MSMS		Seroquel® Seroquel XR, Seroquel Prolong, Stadaquel, Alzen SR, Quetiapin,	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	50-650 nmol/l
Risperidon Rekvirering: NPU29383 Total og delsvar opgives UPLC/MSMS		Risperdal®, Risperanne, Risipolept, Consta, Risperidon.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	15-120 nmol/l (Incl. metabolit)
Sertindol NPU28909 UPLC/MSMS		Serdolect®.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	110-230 nmol/l
Ziprasidon NPU20191 UPLC/MSMS		Zeldox®, Ziprasidon.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	50-300 nmol/l
Zuclopenthixol NPU03962 UPLC/MSMS		Cisordinol®, Clopixol®, Zuclopenthixol acetat.	Serum eller heparin plasma 1 ml** (min. 200 µl)	Tørglas eller heparinglas ikke gelglas	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	3-4/uge	7-30 nmol/l

ANTIDEMENTIA Analyseusikkerhed (impræcision) oplyses ved henvendelse til laboratoriet

Medikament Indholdsstof	Akkrediteret ISO 15189	Handelsnavne	Prøvemateriale og mængde** afpipetteret	Glastype	Opbevaring	Forsendelse LINK: Forsendelse/ holdbarhed	Særlige forhold	Udføres***	Vejledende terapeutisk interval
Donepezil NPU27676 UPLC/MSMS		Aricept® Donepezil	Citrat- Fluorid plas- ma 1 ml** (min. 200 µl). Afpipetteres inden for 6 timer.	Citrat-Fluorid glas.	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	Ca. 1/uge	130-200 nmol/l
Galantamin NPU54721 UPLC/MSMS		Galantamin	Citrat- Fluorid plas- ma 1 ml** (min. 200 µl). Afpipetteres inden for 6 timer.	Citrat-Fluorid glas.	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	Ca. 1/uge	35-140 nmol/l
Memantin NPU54724 UPLC/MSMS		Ebixa Marbodin Mentixa Memantin	Citrat- Fluorid plas- ma 1 ml** (min. 200 µl). Afpipetteres inden for 6 timer.	Citrat-Fluorid glas.	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	Ca. 1/uge	500-835 nmol/l
Rivastigmin NPU54723 UPLC/MSMS		Exelon Nimvastid Rivastigmine Rivastor	Citrat- Fluorid plasma 1 ml** (min. 200 µl). Afpipetteres inden for 6 timer.	Citrat-Fluorid glas.	4° C	Quickbrev eller lignende	Medicinfastende*	Ca. 1/uge	32-80 nmol/l oral (20-50) plaster

GENTEST

Medicinsætning via P450 enzymaktivitet	Akkrediteret ISO 15189	Prøvemateriale og mængde	Glastype	Opbevaring	Forsendelse	Særlige forhold	Udføres***	Vejledende terapeutisk interval
CYP1A2 1) NPU58048 5'nuclease PCR oprenset på DNA		EDTA-blod 3 ml****	EDTA-glas	4° C	Almindelig post	Lukkede rør indtil analyse	En gang ugentligt. Svartid ca. 5 arbejdsdage.	(Hurtig), normal
CYP3A4 2) NPU29776 5'nuclease PCR oprenset på DNA		EDTA-blod 3 ml****	EDTA-glas	4° C	Almindelig post	Lukkede rør indtil analyse	En gang ugentligt. Svartid ca. 5 arbejdsdage.	Langsom, normal
CYP3A5 3) NPU27992 5'nuclease PCR oprenset på DNA		EDTA-blod 3 ml****	EDTA-glas	4° C	Almindelig post	Lukkede rør indtil analyse	En gang ugentligt. Svartid ca. 5 arbejdsdage.	Hurtig, normal
CYP2C9 4) NPU32095 5'nuclease PCR oprenset på DNA		EDTA-blod 3 ml****	EDTA-glas	4° C	Almindelig post	Lukkede rør indtil analyse	En gang ugentligt. Svartid ca. 5 arbejdsdage.	Langsom, nedsat, normal.
CYP2C19 5) NPU19309 5'nuclease PCR oprenset på DNA		EDTA-blod 3 ml****	EDTA-glas	4° C	Almindelig post	Lukkede rør indtil analyse	En gang ugentligt. Svartid ca. 5 arbejdsdage.	Langsom, hurtig, normal.
CYP2D6 6) NPU19308 5'nuclease PCR oprenset på DNA		EDTA-blod 3 ml****	EDTA-glas	4° C	Almindelig post	Lukkede rør indtil analyse	En gang ugentligt. Svartid ca. 6 arbejdsdage.	Langsom, hurtig, nedsat, normal.
UGT1A4 7) 5'nuclease PCR oprenset på DNA NPU58047		EDTA-blod 3 ml****	EDTA-glas	4° C	Almindelig post	Lukkede rør indtil analyse	En gang ugentligt. Svartid ca. 5 arbejdsdage.	Hurtig, normal

Medicinsætning via P450 enzymaktivitet	Akkrediteret ISO 15189	Prøvemateriale og mængde	Glastype	Opbevaring	Forsendelse	Særlige forhold	Udføres***	Vejledende terapeutisk interval
vKORC1¹⁾ 5'nuclease PCR oprenset på DNA NPU49946	 EXAM Reg. No. 1938	EDTA-blod 3 ml****	EDTA-glas	4° C	Almindelig post	Lukkede rør indtil analyse	En gang ugentligt. Svartid ca. 5 arbejdsdage.	Hurtig, normal

v.26- jbram - opdateret 20. september 2021 **Gul markerer ny analyse**

- 1) (omfatter allelet *1F)
- 2) (omfatter allelet *22)
- 3) (omfatter allelet *3)
- 4) (omfatter allelerne *2 og *3)
- 5) (omfatter allelerne *2, *3, *4 og *17)
- 6) (omfatter allelerne *2, *3, *4, *6, *9, *10, *17, *41 samt deletioner og duplikationer)
- 7) (omfatter allelet *3)
- 8) (omfatter allelet *2)

Medicinfaste *: Prøven tages inden indtagelse af morgenmedicin.
Ved depotmedicin tages prøven umiddelbart inden indgift af medicin.
Er dette ikke tilfældet, aftales en ny prøvetagning med rekvirerende afdeling.
For ambulante patienter aftales en ny prøvetagningsdag.

Mængde **: Ønsket minimum prøvemængde, som afpipetteres ved forsendelse. Mindre mængder kan benyttes, hvis det er umuligt eller uhensigtsmæssigt at tage større mængder (eks. små børn). I parentes er angivet den minimale mængde til én analysing.

Udføres ***: For analyser, der ikke køres dagligt, kan det ved telefonisk henvendelse oplyses, hvilken dag i den pågældende uge analysen vil blive udført.

Gentests ****: Hvis der bestilles flere gentests tages kun 1 glas.

Akutservice efter aftale: Analysesvar i dagtiden på hverdage inden for få timer

Prøver sendes til:

Laboratoriet
Visby Alle 3
4293 Dianalund

Yderligere information:

Tlf.: 5827 1177
E-mail: Fil-lab@filadelfia.dk
www.laboratoriet.filadelfia.dk