

Alle medicinanalyser:

- EDTA-glas: [LILLA4](#), [LILLA5](#). Gelglas må ikke anvendes.
- EDTA-glas: [LILLA2](#) kan benyttes ved børn eller vanskelige prøvetagninger.
- Hvis der bestilles flere gentests tages kun 1 glas.
- Opbevares ubehandlet og på køl indtil forsendelse. Se holdbarhed for den enkelte analyse.
- Send så vidt muligt samme dag som prøven er taget.
- Afsend ikke på fredage, lørdage eller dagen før en helligdag.
- Afsendes som Quickbrev fra posthus eller af distributør med tilsvarende kort transporttid (dag-til-dag levering).

Prøver sendes til:

Laboratoriet
Kolonivej 11
4293 Dianalund

Udføres ugentligt (Svartid: 90 % inden for 8 arbejdsdage).

Analyserne foretages som 5'nuclease PCR oprenset på DNA.

Vær opmærksom på at svartiderne kan være længere i forbindelse med ferieperioder og helligdage.

Har du brug for konkret viden om svartider i disse perioder, kontakt laboratoriet på 58271177.

Fil-lab@filadelfia.dk

www.laboratoriet.filadelfia.dk

Tabel - Gentest

Analyse			Fremsend		Holdbarhed			Analyse	
					Ubehandlet				
Test	Allel	NPU	Prøvemateriale & Mængde	Særligt	20-25°C	2-8°C	-20°C	Akkrediteret	Pris
CYP2D6	*2, *3, *4, *6, *9, *10, *17, *41 samt deletioner og duplikationer	NPU19308	EDTA-blod	Ubehandlet i lukket rør	5 dage	31 dage	<2 år	 EXAM Reg.No. 1038	1250,-
CYP1A2	*1F	NPU58048	EDTA-blod	Ubehandlet i lukket rør	5 dage	31 dage	<2 år	 EXAM Reg.No. 1038	380,-
CYP3A4	*22	NPU29776	EDTA-blod	Ubehandlet i lukket rør	5 dage	31 dage	<2 år	 EXAM Reg.No. 1038	380,-
CYP3A5	*3	NPU27992	EDTA-blod	Ubehandlet i lukket rør	5 dage	31 dage	<2 år	 EXAM Reg.No. 1038	380,-
CYP2C9	*2 og *3	NPU32095	EDTA-blod	Ubehandlet i lukket rør	5 dage	31 dage	<2 år	 EXAM Reg.No. 1038	600,-
CYP2C19	*2, *3, *4 og *17	NPU19309	EDTA-blod	Ubehandlet i lukket rør	5 dage	31 dage	<2 år	 EXAM Reg.No. 1038	985,-